



**tecnimoem**  
investigación+desarrollo+innovación



ENTIDAD ASOCIADA

Licencia de  
fabricación de  
Producto Sanitario  
Nº 5867-PS



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID 9105054418

#### **TECNIMOEM 97, S.L.**

Ctra. Logroño-Mendavia, km. 5  
31230 VIANA (Navarra) ESPAÑA  
Tel.: + 34-948-646-213 Fax: + 34-948-646-380  
E mail: [tecnimoem@tecnimoem.com](mailto:tecnimoem@tecnimoem.com)  
Web: [www.tecnimoem.com](http://www.tecnimoem.com)

### **ARNÉS DORSOLUMBAR PARA GRÚA DE TRANSFERENCIA CARGA MÁXIMA ARNÉS 200 KG.**

#### **CARACTERÍSTICAS**

Confeccionado con tratamiento **Thermy-tex** superabsorbente que anula eficazmente la reproducción de bacterias y la formación de olores. Transpirable, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción. Poliéster 100%. Regulación en tres alturas con anclaje de seguridad.

#### **FUNCIONES Y MODO DE EMPLEO**

Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal asistencial.

El arnés es adecuado para personas con movilidad de la cabeza. Puede usarse sentado y acostado. Puede usarse con las piernas juntas o separadas dependiendo del grado de movilidad del paciente.

#### **SEGURIDAD**

No utilizar nunca con cargas superiores a la carga máxima de la grúa (marcada sobre la misma) o del arnés (200kg.).

Compruebe que el arnés se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo con pacientes. Se recomienda usarlo previamente en personas sanas para familiarizarse con él.

No utilizar el arnés si presenta signos de rasgado, desgaste o deformación.


#### **LAVADO Y SECADO**

Lavado recomendado a 30° con jabón neutro. No usar lejía ni lavar en seco. No admite planchado. Secado sobre superficie plana. No exponer al sol o fuente de calor. No admite secadora.



*Asegúrese de que el arnés tiene el tamaño y características adecuados al paciente*

**TALLA M (cotas en mm.)**

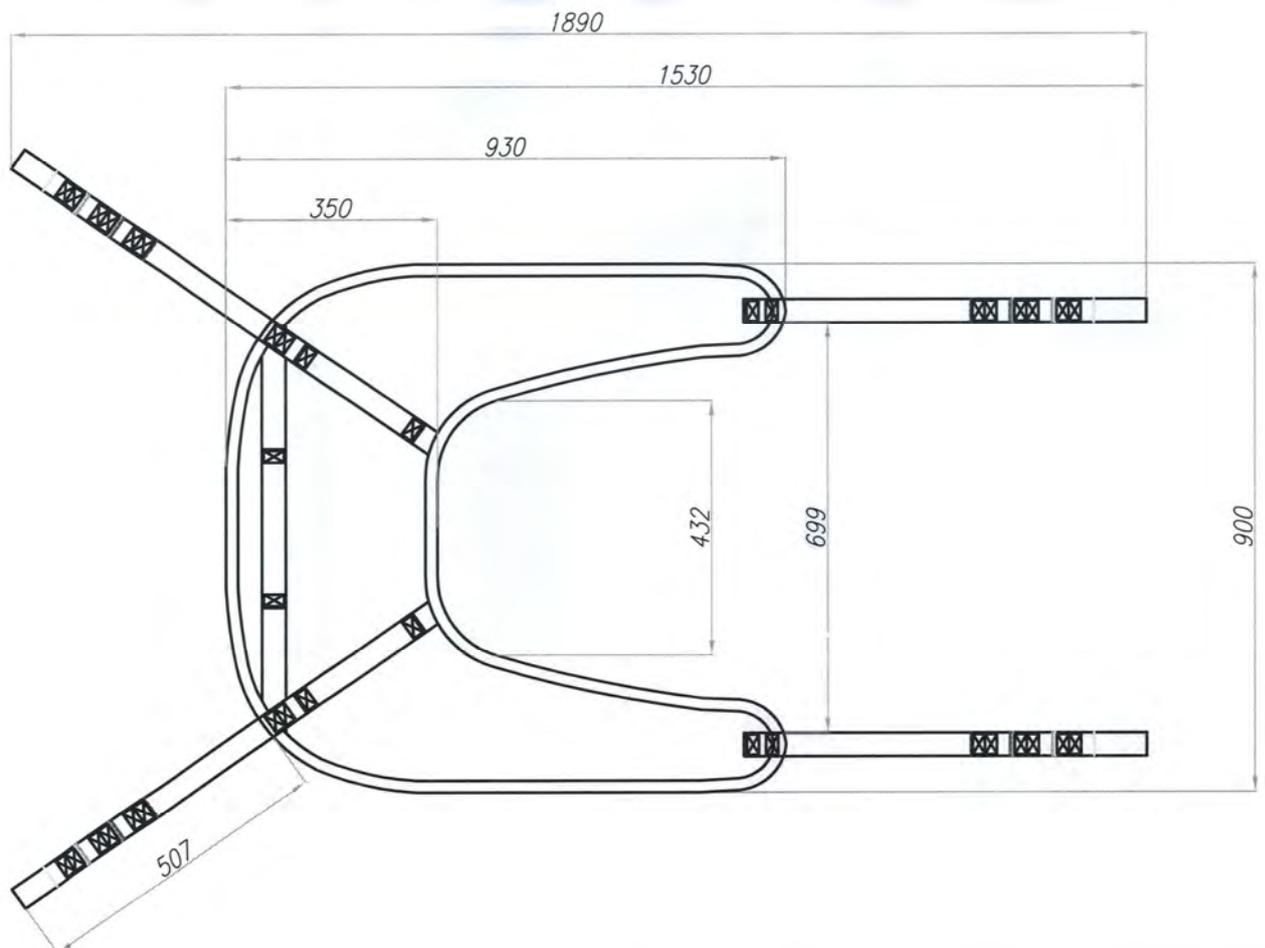

*El arnés TECNIMOEM junto con la grúa POWERLIFT está diseñado y fabricado según la normativa UNE-EN ISO 10535:2007 Grúas para el traslado de personas con discapacidad. Requisitos y métodos de ensayo.*