



rabbit™

Rabbit es segura, fiable y fácil de ajustar, además, cubre todas las necesidades de cualquier niño. Le proporciona al niño la capacidad de explorar y entretenerse con nuevas y emocionantes aventuras.



La posición vertical permite al niño ser un participante activo al mismo tiempo que estimula los sentidos y le otorga al niño mayor independencia. Su accesible y sencillo diseño le garantizan al usuario la máxima movilidad en la posición erguida.

La colocación del reposapiés más cerca del suelo asegura un fácil emplazamiento y posicionamiento del niño. El niño está al mismo nivel que sus compañeros.

Rabbit viene en cuatro tallas y está diseñada para niños entre 1 a 18 años. No todos los niños son iguales – por eso es tan importante usar la tabla de medidas para encontrar el talla correcta del niño.



0° - 30°



max.70 kg



61½-70 cm



62-90 cm




Control de inclinación

Rabbit tiene un sistema de control del ajuste de la inclinación fácil y simple de utilizar y permite obtener la mejor posición vertical posible



Freno central

Equipada con un sistema de freno activable por el usuario que bloquea las ruedas para una conducción segura y firme

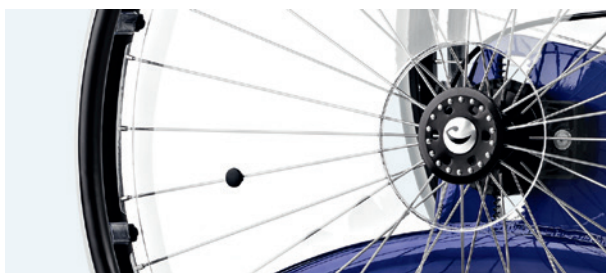

Sistema Quick Release

Las dos ruedas motrices están equipadas con el sistema quik release para facilitar el montaje. Las ruedas están disponibles en una gran variedad de tamaños por cada talla del Rabbit



Preparado para accesorios

Todas las tallas de Rabbit se pueden equipar con todas las tallas de los accesorios. Rabbit está diseñada con ranuras en la barra central para el montaje de los accesorios




Estándar

El modelo estándar de Rabbit se entrega con chasis y barra central. Por favor, haga su pedido de accesorios en las siguientes páginas



Color del chasis

Disponible en colores diferentes para las tallas 1, 2, 3 y 4

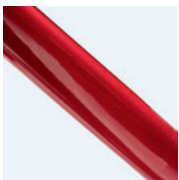

Rojo para talla 1



Azul para talla 2 y 3



Plateado para talla 4

Rueda motriz

Por favor escoja el tamaño de la rueda motriz para completar la configuración de su Rabbit





22" 24" 26" para talla 1



26" 29" 32" para tallas 2 y 3



32" 36" para talla 4

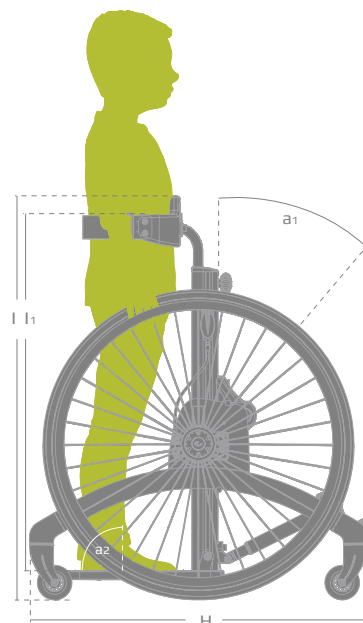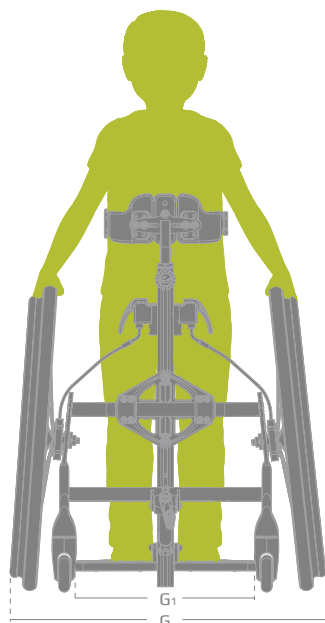

Medidas

	Rabbit talla 1 An/22" ruedas	Rabbit talla 1 An/26" ruedas	Rabbit talla 1 An/32" ruedas	Rabbit talla 4 An/36" ruedas
Ancho (G)	61½ cm (24")	72 cm (28")	73 cm (28½")	74 cm (29")
Anchura interior (G1)	32½ cm (12¾")	42½ cm (17¼")	42½ cm (17¼")	42½ cm (17¼")
Longitud (H)	62 cm (24¼")	75 cm (29¼")	80 cm (31¼")	90 cm (35")
Altura desde el suelo (I)	67-100 cm (26¼-39")	85-118 cm (33¼-46")	99-131 cm (38½-51")	120-153 cm (46¾-59¾")
Height from foot plate (I1)*	55-74 cm (21½-29")	75-108 cm (29¼-42")	83-119 cm (32½-46½")	96-142 cm (37½-55½")
Inclinación de la barra central (a1)	0 to +30°	0 to +30°	0 to +30°	0 to +30°
Inclinación del reposapiés (a2)	+15° to -10°	+15° to -10°	+15° to -10°	+15° to -10°
Curvatura	8°	6°	4°	4°
Longitud de la barra central	50 cm (19½")	70 cm (27¼")	80 cm (31¼")	100 cm (39")
Peso	13,5 kg (29,5 lb)	15,5 kg (34 lb)	16 kg (35 lb)	18,5 kg (40,5 lb)
Peso máximo del usuario	40 kg (88 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	70 kg (154 lb)

* La medición de Rabbit es en posición vertical y con el reposapiés en la posición más baja. Es posible elevar el reposapiés para niños más pequeños.



ACCESORIOS



Reposapiés

86121x

Asegura la correcta posición de los pies

Talla	medidas
1	W:31 x D:30 cm
1-5	W:43 x D:36 cm



Talonerar

861251-2

Garantiza la posición correcta de los pies

Talla	medidas
P	H:4 x W:10 cm
G	H:4 x W:14½ cm



Zapatillas, reposapiés articulados

86122x Para instalarse en la plataforma para pies

Talla	medidas
1	W:9½ x D:20 cm
2+3	W:11½ x D:24 cm
4+5	W:15 x D:30 cm



Platформа con zapatillas

86149/86147/86148 Garantizan la postura correcta de los pies

Talla	medidas
0	17½ cm
1+2	W:10 x D:21½ cm
3+4	W:11 x D:24 cm



Reposapiés individuales con zapatillas articuladas

86120x

Talla	medidas
1	W:9½ x D:20 cm
2+3	W:11½ x D:24 cm



Soporte de rodillas, articulado

86131x Posiciona las piernas correctamente mientras desplaza la presión por encima y debajo de la rodilla

Talla	medidas
1	W:7½ cm
2+3	W:9½ cm
4+5	W:11½ cm



Soporte de rodillas

86130x

Posiciona las piernas correctamente

Talla	medidas
1	H:6 x W:6 cm
2+3	H:7 x W:8 cm
4+5	H:7 x W:10 cm



Soporte abdominal

861411

Soporta la posición del tronco del niño. La almohadilla del soporte abdominal es reversible

Talla	medidas
Único	H:13 x W:19 cm



Soporte para caderas, frontal

86160x Para soporte y estabilidad adicional. Las almohadillas soporte para caderas son reversibles

Talla	medidas
1	H:11xW:15½xD:7½
2+3	H:11xW:20+27xD:7½
4+5	H:16xW:25-32xD:10½



Soporte para caderas, anti-rotación

86161x Para un posicionamiento preciso, las almohadillas soporte para caderas son reversibles

Talla	medidas
1	H:11xW:15½xD:7½
2+3	H:11xW:20-27xD:7½



Soporte para caderas, posterior

86150x Para soporte y estabilidad adicional. Las almohadillas soporte para caderas son reversibles

Talla	medidas
1	H:11xW:15½xD:7½
2+3	H:11xW:20-27xD:7½
4+5	H:16xW:25-32xD:10½



Soporte de glúteos

861401

E estabiliza la pelvis desde atrás en posición prono y erguida

Talla	medidas
Única	H:13 x W:19 cm

ACCESORIOS



Soporte para el pecho

86170x

Para soporte de la parte superior del cuerpo. Las almohadillas del soporte pectoral son reversibles

Talla	medidas
1	H:11xW:15½ xD:7½
1	H:11xW:20-27xD:7½
2+3	H:11xW:20-27xD:7½
4+5	H:16xW:25-32xD:10½



Soporte para tronco

86180x Modelo Pony/Bronco.

Para soporte de la parte superior del cuerpo

Talla	medidas
1	H:14 x W:22 x D:12
2	H:14 x W:27 x D:12
3	H:14 x W:32 x D:12



Extensión central

861421/861422 Para eliminar el hueco entre las dos almohadillas de soporte para pecho

Talla	medidas
P	H: 11 cm
G	H: 16 cm



Pieza de extensión

861480

Alarga la barra central y permite incluso una posición más precisa

Talla	medidas
Único	H:8 cm



Reposacabezas

861424-3, 861424-4

Para su correcta posición y soporte

Talla	medidas
1	20 cm
2	33 cm



Mesa-cubeta

862501

Sólo para Rabbit. Para actividades y diversos juegos

Talla	medidas
Único	H:9 x W:31 x D:10 cm



Mesa

862515



Soporte para caderas

861610, 861620, 861630

1	S
2+3	M
4+5	L