

COJINES SANITIZED

DESCRIPCIÓN

Cojines antiescara redondo con agujero, cuadrado, cuadrado con agujero, herradura cuadrada y herradura redonda.

COLORES

Blanco, Gris y Marino

COMPOSICIÓN

Suapel- 60%poliéster, 40% acrílico
Terlenka - 65% poliéster, 35% algodón
Relleno - fibra de poliéster siliconada

EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara / Postparto

MANTENIMIENTO

Cepillar o sacudir periódicamente la cara de fibra para mantenerla en condiciones óptimas y ralentizar su deterioro. Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. En caso de lavar a máquina utilizar un programa delicado y suprimir el centrifugado. Se recomienda utilizar una funda o red especial para evitar una deformación excesiva durante el lavado. Secar en posición horizontal. No planchar. No usar lejía. No limpiar en seco.

GARANTÍA

El periodo de garantía de los cojines sanitized es de 2 años. Esta garantía se inicia con la fecha de compra del distribuidor. Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y no sustituye a las garantías legales. En caso de incidencia contacte con el proveedor.

DURACIÓN DE VIDA DEL PRODUCTO

1 año

MODELO	REF.	DIMENSIONES (cm)
REDONDO C/AGUJERO BLANCO	101100	44x11
CUADRADO C/ AGUJERO BLANCO	101101	44 x 44 x 11
HERRADURA REDONDA BLANCO	101102	
CUADRADO 44X44 BLANCO	101103	
HERRADURA CUADRADA BLANCO	101104	
CUADRADO 44x44 GRIS	101106	
CUADRADO 44x44 MARINO	101108	
REDONDO C /AGUJERO GRIS	101200	44x11
REDONDO C /AGUJERO MARINO	101201	44 x 44 x 11
HERRADURA REDONDA GRIS	101202	
HERRADURA REDONDA MARINO	101203	
HERRADURA CUADRADA GRIS	101204	
HERRADURA CUADRADA MARINO	101205	
CUADRADO C/AGUJERO GRIS	101210	
CUADRADO C/AGUJERO MARINO	101212	